


毛細管現象を用いる微量採血管を使って採血をする際の重要なポイント

毛細管現象を用いる微量採血管を使って採血する際、最も重要なポイントは

採血管の先端が針の根元にしっかりと届いていること！

●装着のコツ

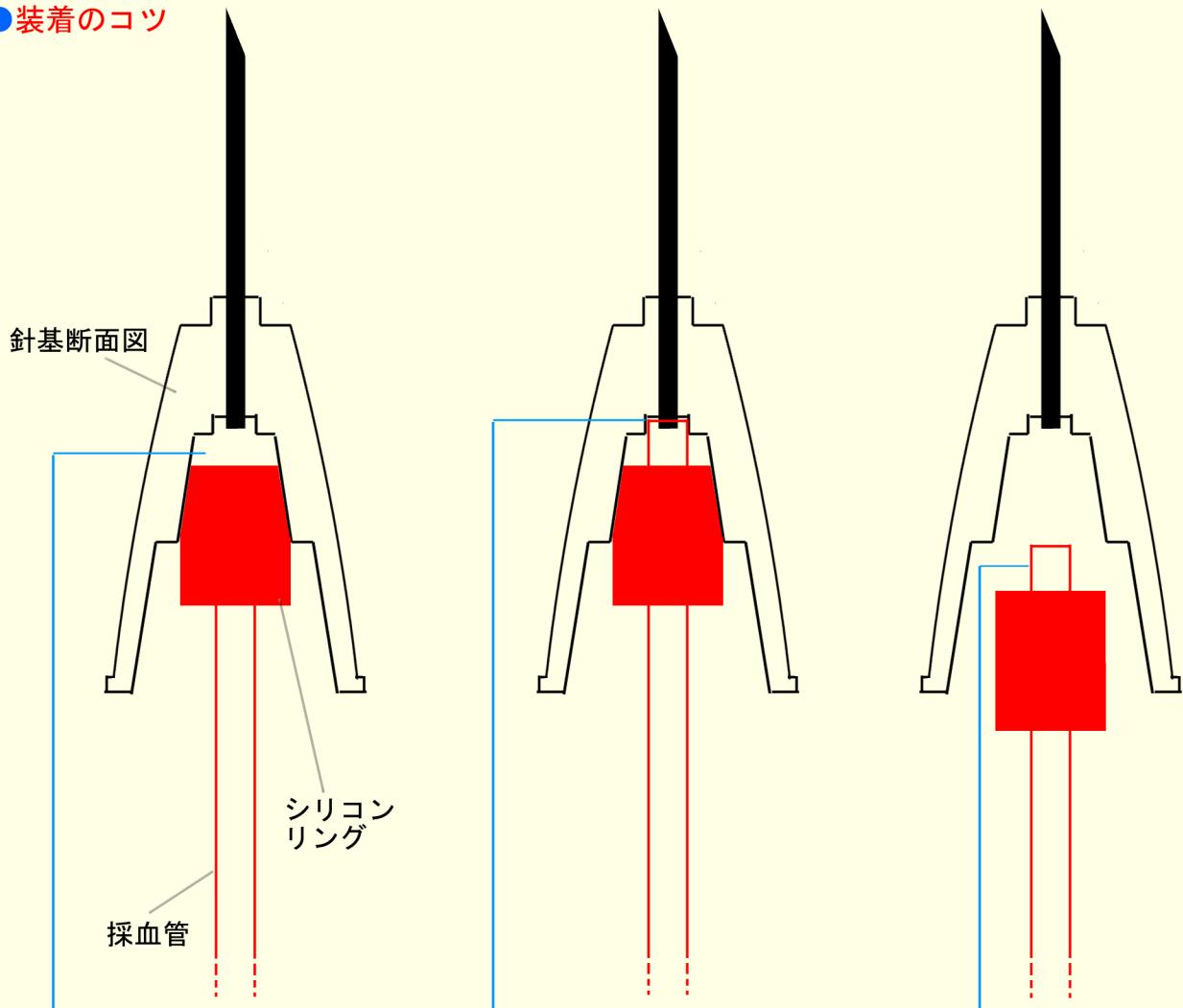


採血管と針の間に空間がある
と血液が溜まったり、空気が
入ってきたりしてうまく採血
できません

少し捻りながら採血管を押し
込んで採血管の先端が針の根
元に届くようにするとうまく
採血できます

予め採血管の先端をシリコンリ
ングより出して針基に装着して
もいいですが、メーカー違いま
たは同じメーカーでも針基の形
状に微妙に個体差があるので、
初めはそのままの状態で装着開
始することをお勧めします

※シリコンリング部分を採血管と同じ材質にしなかったのは、
シリコンの柔軟性を利用し、針基の微妙なサイズの誤差を埋
めて微調整を可能にするためです

●その他のコツ

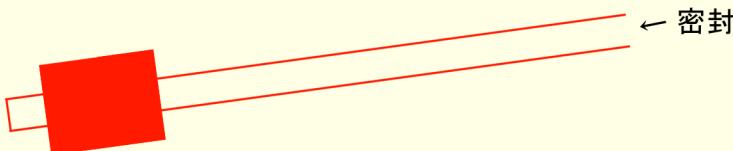

針基から採血管を取り外す際、採血管の底
に小指を当てがって密封すると血液がこぼ
れることはあります。

血液を採血管から取り出す際は密封状態を
解除して採血管を傾けると重力で血液が流
れ出できます。